

Особенности набора New Dr. SOS+ Kit

01. Универсальное решение: Набор для удаления имплантатов

Позволяет решать любые сложные случаи, такие как перелом имплантата, перелом абатмента, перелом винта, деформация шестигранника 1.2 и т.д.

02. Все самое необходимое в одном наборе

Хирургический набор состоит из 17 простых компонентов.

03. Интуитивно понятный протокол удаления имплантата

Простая и надежная методика, которая выполняется одним обратным вращением после установки универсального драйвера.

04. Протоколы удаления имплантатов при различных клинических случаях

Применение



- | | | |
|------------------------------------|--|---|
| 01 Резорбция костной ткани | 04 Полный перелом (горизонтальный) | 07 Повреждение формирователя десны/заглушки |
| 02 Трещина | 05 Повреждение внутренней структуры имплантата | 08 Перелом винта абатмента |
| 03 Неполный перелом (вертикальный) | 06 Перелом абатмента | 09 Износ шестигранника винта абатмента |

D:O IMPLANT

dio-russia.ru



*Запрещен на территории
Российской Федерации

Набор New Dr. SOS+ Kit


Один набор для решения любых случаев
отторжения или поломки имплантатов



Набор New Dr. SOS+ Kit

Один набор для любых случаев
отторжения и поломок имплантатов

Код набора | DRS 05

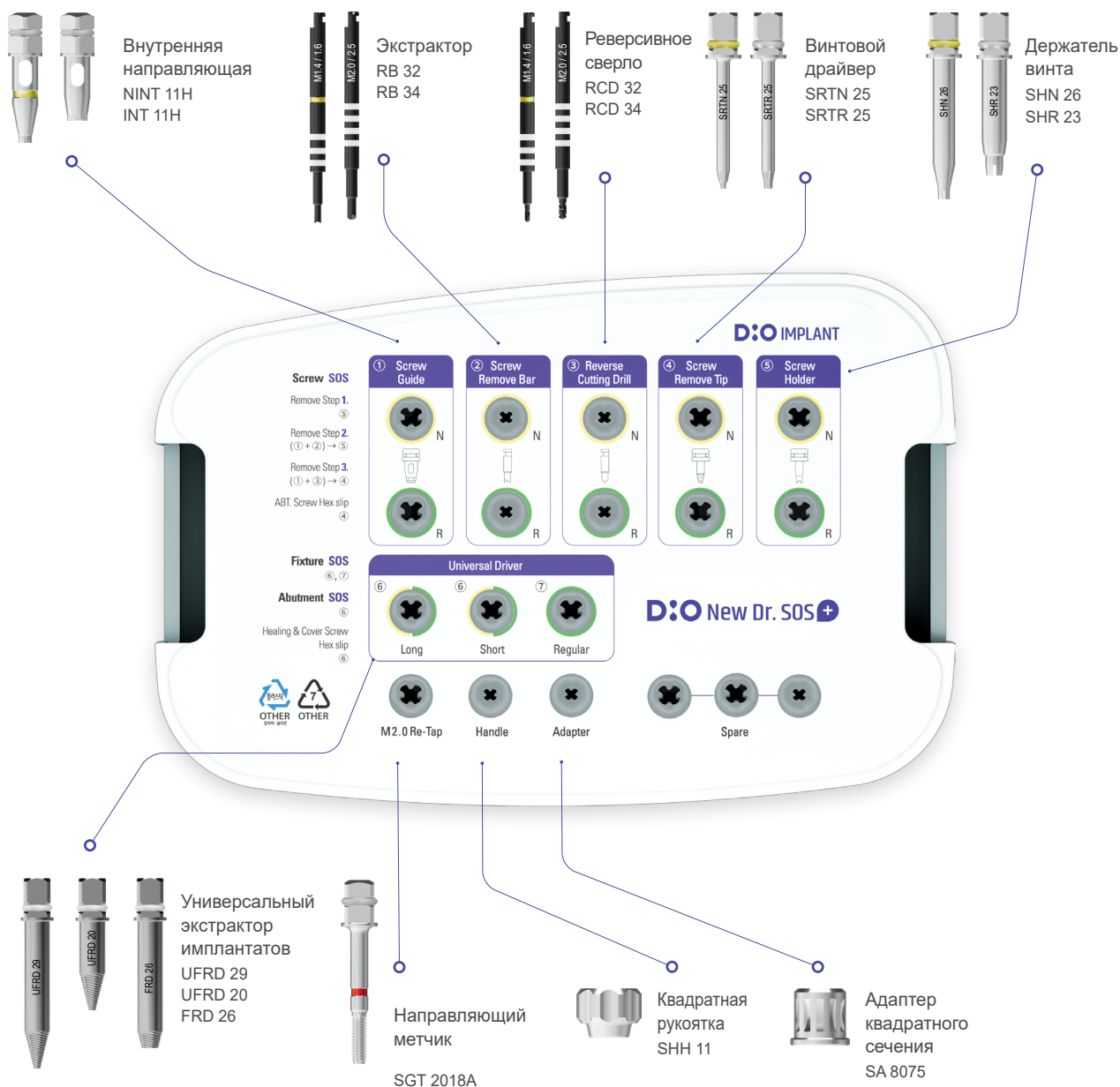

Квадратный ключ
SSW 050




*Компоненты нижней панели


Решение при переломе имплантата. Один инструмент для всех ЭКСТРЕННЫХ случаев!

01 Удаление сломанного имплантата

※ CCW : против часовой стрелки, CW : по часовой стрелке

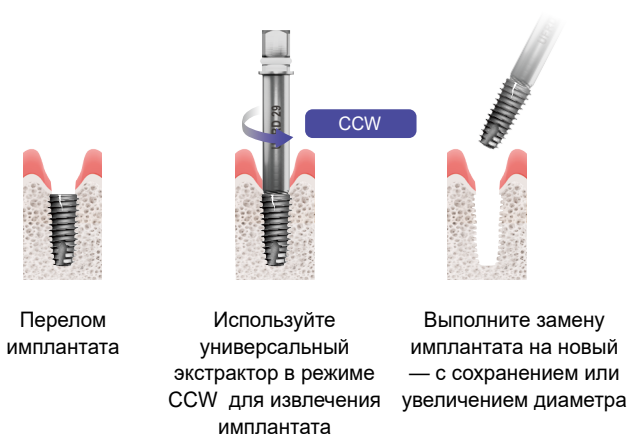


02 Удаление сломанного абатмента

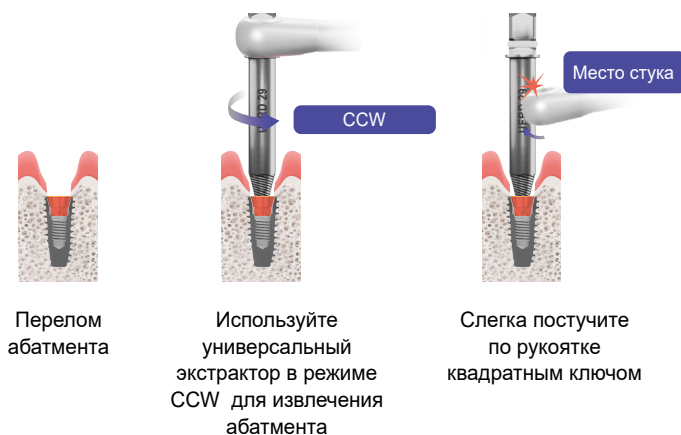


Удаление сломанного винта абатмента. Высокая вероятность у

04 Удаление сломанного винта абатмента


※ CCW : против часовой стрелки, CW : по часовой стрелке

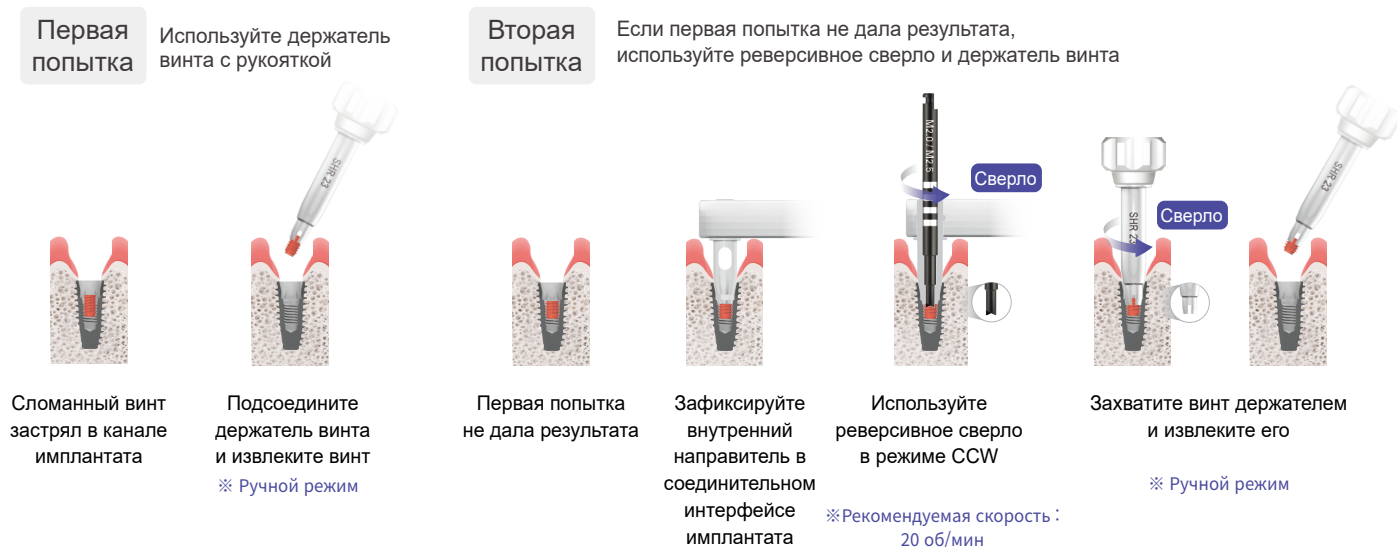

05 Удаление винта абатмента с повреждённым шестигранником

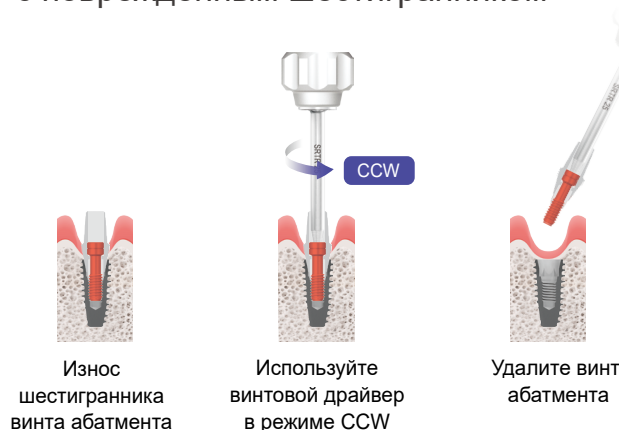

06 Восстановление повреждённой резьбы имплантата

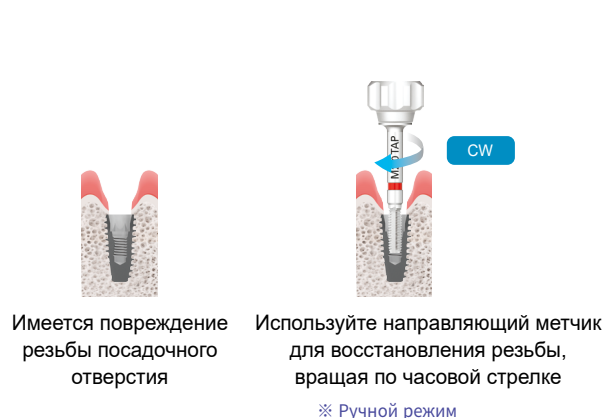

03

Удаление формирователя десны / заглушки с поврежденным шестигранником



Слегка покачайте универсальный драйвер из стороны в сторону, чтобы удалить абатмент




Поврежденный шестигранник



Используйте универсальный экстрактор в режиме CCW




Извлеките формирователь десны или заглушку

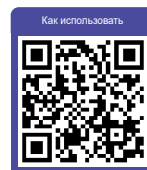

успеха!

Третья попытка

Если вторая попытка не дала результата, используйте реверсивное сверло и держатель винта

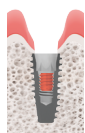

Вторая попытка не дала результата




Зафиксируйте внутренний направляющий в соединительном интерфейсе имплантата

※ Убедитесь в надёжной фиксации




Используйте реверсивное сверло в режиме CCW

※ Рекомендуемая скорость: 1200 об/мин
※ Обязательно используйте ирригацию
※ Заглубление: не менее 1 мм

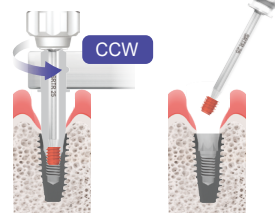

Установите винтовой драйвер с направляющим, захватите винт и извлеките его

※ Ручной режим

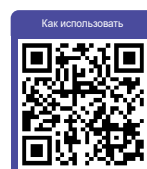

Справка

Отсоединение имплантата от имплантовода



Вставьте имплантат в X-образное отверстие квадратного ключа. Нажмите вниз и поверните по часовой стрелке, чтобы отсоединить имплантовод

